

ClearLight IPL



MEDEQ BEAUTY

ClearLight IPL


→ многофункциональная система с IPL-технологией для терапии дерматологических заболеваний

ClearLight IPL — эффективный помощник в лечении акне, гиперпигментаций, телеангиэктазий и блефаритов. Благодаря отсутствию периода реабилитации подходит для проведения «процедур на выход». 6 светофильтров и 6 длин волн позволяют проводить 10 разнонаправленных процедур у пациентов любого возраста и с разным типом кожи. Благодаря ClearLight можно делать фотоэпиляцию без покупки дополнительного оборудования. В аппарат заложены готовые протоколы для лечения основных дерматологических заболеваний. При необходимости косметолог может создать свою программу терапии, регулируя температуру, длительность импульса с шагом 1 миллисекунда, а также количество импульсов.

6 светофильтров (= 6 длин волн)
430 нм | 515 нм | 560 нм | 585 нм | 640 нм | 700 нм

Регистрационное удостоверение
№РЗН 2022/18431 от 4 октября 2022 года

Показания ✓ к применению

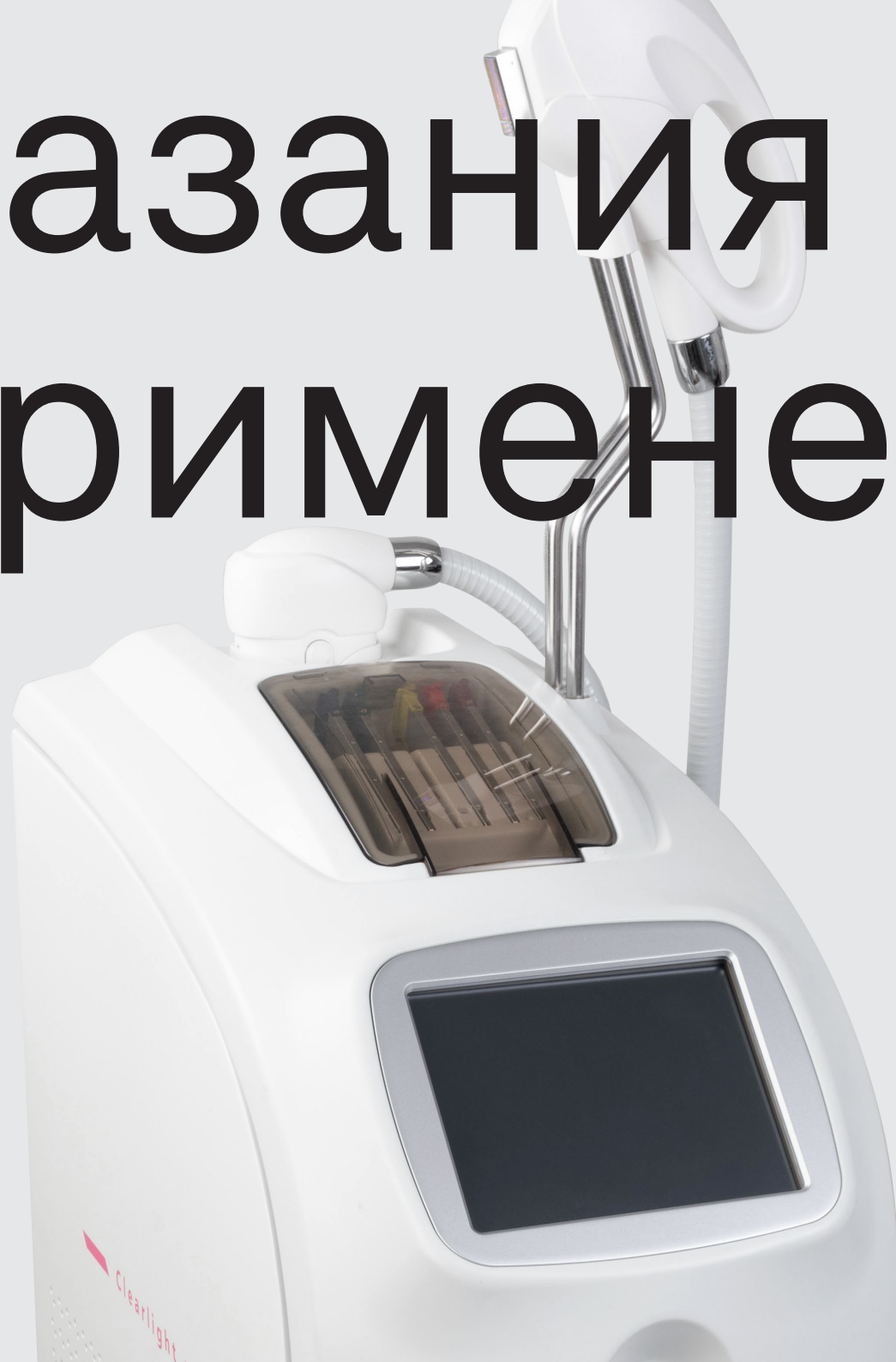

Показания к применению

ClearLight IPL → инновация в технологии IPL для дерматологического лечения и удаления волос в одной манипуле

- Термолифтинг кожи
- Стимуляция выработки коллагена
- Лечение сосудистых патологий
- Лечение купероза и розацеа
- Удаление пигментации и веснушек

- Регуляция работы сальных желёз
- Лечение акне и постакне на лице и теле
- Лечение мелазмы
- Фотоэпиляция нежелательных волос на лице и теле

⑥ видов фильтров в базовой комплектации ✓

Предустановленные программы и ручное управление для экспертов А•класса



Виды фильтров

Фильтр						
	синий 430 нм	зелёный 515 нм	салатовый 560 нм	жёлтый 585 нм	красный 640 нм	бордовый 700 нм
Хромоформ	порфирин	оксигемоглобин	меланин	оксигемоглобин	меланин	меланин
Назначение	антибактериальное воздействие	лечение розацеа и сосудистых звёздочек	устранение эпидермального пигмента	устранение телеангиэктазии, покраснений	лечения эпидермальной меланодермии, гиперпигментации и стимуляция синтеза коллагена	удаление нежелательных волос у женщин и мужчин на любых участках тела
Описание	активирует порфирин и генерирует реактивные виды кислорода	поверхностная глубина проникновения, высокая абсорбция кровеносными сосудами	высокое поглощение меланином	большая глубина проникновения, высокая абсорбция кровеносными сосудами	большая глубина проникновения, низкое поглощение меланином	большая глубина проникновения

Инновации в IPL: новый уровень комфорта и эффективности для пациента

Квадратный импульс + тонирующий импульс (toning pulse) = отсутствие термического повреждения (ожога), гиперпигментации и болезненности



Импульсы

Квадратный импульс

- Непрерывная генерация потока энергии
- Точное и безопасное воздействие
- Стабильная подача энергии без перепадов

Тонизирующий импульс

- Воздействие на каждом слое от эпидермиса к дерме
- Деление импульса на мини-импульсы
- Подавление ненужного теплового повреждения окружающих тканей
- Отсутствие жжения, болезненности

Процедура

экспресс-процедура
на выход для любого
участка лица и тела

«Вуаль красоты» или Viel Toning

- Можно проводить как до дерматологической процедуры, так и в качестве завершающего омолаживающего этапа ✓
- Подходит для любого фототипа кожи

- Даёт светоотражающий эффект — безупречная матовая кожа без блеска
- Работа на уникальном режиме с делением 1 импульса на 8 мини-импульсов — безопасно и эффективно




до



сразу после процедуры



1 месяц после

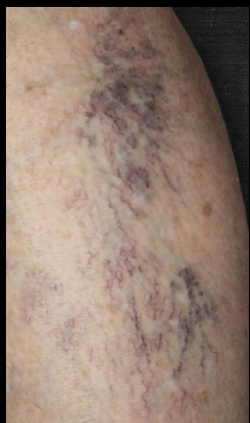

до



сразу после процедуры



1 месяц после

Светофильтр	585 нм
Мощность	35 Дж
Охлаждение	от 0 до -5°C
Режим импульса	из 3-х мини-импульсов
Время 1-го мини-импульса	3 мс
Интервал до 2-го мини-импульса	20 мс
Время 2-го мини-импульса	7 мс
Интервал до 3-го мини-импульса	10 мс
Время 3-го мини-импульса	9 мс

Первый мини-импульс коагулирует мелкие сосуды, второй — более крупные, третий — добавляет энергию для заключительной коагуляции

⚠ Интервал между мини-импульсами позволяет охладить эпидермис для предупреждения перегрева тканей и нежелательных осложнений

Терапия гиперпигментации и мелазмы



5 процедур, светофильтры 560 нм и 640 нм,
5-я процедура на светофильтре 515 нм для wow-эффекта

Протокол ↘

① проход

Светофильтр	640 нм
Мощность	25 Дж
Режим импульса	из 2-х мини-импульсов
Время 1-го мини-импульса	8 мс
Интервал до 2-го мини-импульса	10 мс
Время 2-го мини-импульса	12 мс

② проход

Светофильтр	560 нм
Мощность	23 Дж
Режим импульса	из 3-х мини-импульсов
Время 1-го мини-импульса	10 мс
Интервал до 2-го мини-импульса	12 мс
Время 2-го мини-импульса	10 мс
Интервал до 3-го мини-импульса	20 мс
Время 3-го мини-импульса	15 мс

ⓘ Интервал охлаждения всегда больше времени первого мини-импульса

Терапия блефаритов и синдрома «сухого глаза»*

Результаты:

- Терапия сосудистых патологий в зоне мейбомиевых желёз
- Ревитализация — нормализация функций мейбомиевых желёз за счёт IPL-прогрева
- Антибактериальный эффект — 100% эрадикация демодекса

Протокол ↘

Светофильтр	585 нм
Режим импульса	тройной длительность и задержка импульса зависит от фототипа
Количество импульсов	10-15
Количество проходов	2

2 в 1: технология для лечения синдрома «сухого глаза» и фототерапии периорбитальной зоны

*По данным ВОЗ, более 350 млн. человек в мире страдают от синдрома сухого глаза, в РФ заболевание диагностировано более чем у 40% взрослого населения, чаще всего, старше 40 лет

Результаты пациентов на ClearLight IPL

Процедуры выполнены врачом-косметологом
→ Медведевой Кристиной Валерьевной

Пациентка 53 года, лечение гиперпигментации,
1 сеанс, результат через 1 день

Пациент 36 лет, терапия гематом после субцизии рубцов,
1 сеанс, результат через 1 день



Кейс от Алёшиной Екатерины Леонидовны

Пациентка 53 года

Покраснение и гиперпигментация в области носа, щёк, подбородка. Деформационно-отёчный морфотип старения.

В анамнезе инсулинорезистентность, лечение несколькими таблетированными препаратами. Ожирение III степени. Фототип III по Фитцпатрику.

Наблюдается эритематозная форма розацеа в виде сети расширенных капилляров в области носа и характерные для мелазмы участки гиперпигментации светло-коричневого цвета на щеках, лбу, над верхней губой

План терапии:

3 процедуры IPL на аппарате ClearLight IPL

Режим: многоимпульсный

Светофильтры: 640 нм | 560 нм | 585 нм

Подробный ход лечения с описанием параметров аппарата [читайте здесь](#)

Проведено:

3 процедуры IPL на аппарате ClearLight IPL. Результат после 2 процедур через 10 дней после

Врач-косметолог, высшая категория.
Главный врач клиники «Этель» в г. Брянске

→



Безопасная ✓

СТАТЬЯ

использование многоимпульсного режима
для точного контроля энергии и минимизации
побочных эффектов у смуглых пациентов
и пациентов с сопутствующей паталогией

IRL•терапия

гиперпигментации и розацеа

Автор: Алёшина Екатерина Леонидовна
Врач-косметолог, высшая категория.
Главный врач клиники «Этель» в г. Брянске



Технические характеристики ClearLight IPL



- Источник излучения: высокоинтенсивный импульсный широкополосный свет (ксеноновая лампа)
- Длина волны: 430 нм | 515 нм | 560 нм | 585 нм | 640 нм | 700 нм
- Энергия импульса: 3-40 Дж/см²
- Длительность импульса: 0-90 мс
- Типы импульсов: одинарный, двойной, тройной, многократный (тонизирующий)
- Размер пятна: 15 мм x 40 мм
- Охлаждение (max): -20°C
- Экран: 8 дюймов, LCD, сенсорный
- Габариты (Ш x Д x В): 310 мм x 950 мм x 589 мм
- Вес: 75 кг
- Производитель: Eunsung
- Страна производства: Южная Корея
- Гарантия: 12 месяцев



ClearLight IPL → выбор врачей-косметологов
в >50 регионах России!

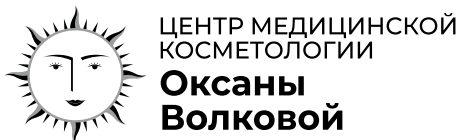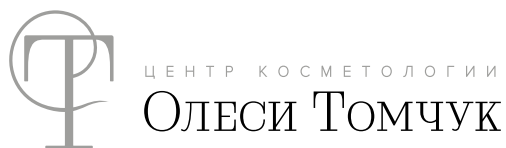

#KONNOVICH



Отзывы врачей о работе на ClearLight IPL

Больше реальных отзывов, а также клинические кейсы и обзоры оборудования в наших социальных сетях



31 мая 2023 г.



Очень мощный аппарат, особенно удивила работа по сосудам, много слышала, что фотосистемы, что не все справляются с удалением сосудов, сейчас очень много пациентов с розацеа и куперозом, это аппарат очень хороший помощник в лечении.

Достоинства: Великолепная работа по сосудам и пигменту

Недостатки: Не обнаружено, очень жаль, что это моноаппарат

129626 | Москва
проспект Мира 102
строение 1 | этаж 6

medeq.ru

Medeq Beauty –
эксклюзивный
дистрибьютор
ClearLight IPL в РФ